


# Reinigungsindikator für die Routineüberprüfung von Thermodesinfektoren

## Josafe

Cleaning Challenge Indicator

Der Josafe CCI easy Reinigungsindikator wurde speziell in vier Felder aufgeteilt, um verschiedene Instrumenten- Kategorien zu simulieren: 4 in 1!

Spaltmass 1.0 mm  
simuliert Augeninstrumente

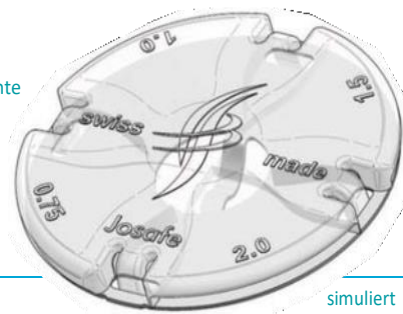

Spaltmass 1.5 mm  
simuliert Scheren und Pinzetten

Spaltmass 0.75 mm

Spaltmass 2.0 mm simuliert MIC Instrumente  
simuliert Standardinstrumentarium



Positives Resultat



Negatives Resultat



Negatives Resultat



Negatives Resultat

Gemäss Swissmedic-Richtlinien (Unterhaltungspflicht) muss der Thermodesinfektor regelmässig auf seine Funktion überprüft werden. Empfehlung ist wöchentlich. Dabei auf jeder Beladungsebene einen Indikator einsetzen und sicherstellen, dass die Indikatoren, wenn möglich an einer kritischen Stelle positioniert werden.