

Lübbecke, im Oktober 2012

Gebrauchsanweisung

GERLACH Fußpflegeschränk AT / NT Mini

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren zum Kauf dieses Fußpflegeschranks.

Sie haben hiermit ein hochwertiges Produkt erworben, das Ihnen bei sachgerechter Pflege lange Jahre gute Dienste leisten soll.

Mit der großen Auswahl an Zubehör ist der Fußpflegeschränk optimal abgestimmt auf den Betrieb mit den **Absauggeräten SATURN AT MICRO, LUNA AT MICRO, TRITON AT MICRO**, den **Spraygeräten SIRIUS NT MICRO, NEPTUN NT MICRO** und dem **Fußpflegegerät PUCK MICRO**.

Bevor Sie diesen Fußpflegeschränk in Betrieb nehmen, möchten wir Sie bitten, diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durchzulesen.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Ihre
EDUARD GERLACH GMBH

EDUARD GERLACH GMBH
Bäckerstraße 4-8
D - 32312 Lübbecke

☎ 05741/330-0
Fax 05741/347300

Charge: 2010/12

1. Technische Daten

- Netzspannung: 230 V
- Anschlusswert der Mehrfachsteckdose: 3600 W (max.)
- Schutzklasse: I - BF
- Maße (ohne Anbauten): B x T x H (in mm)
Fußpflegeschränk AT/NT Mini 495 x 480 x 750
- Gewicht: 45,3 kg
Fußpflegeschränk AT/NT Mini

Die EDUARD GERLACH GMBH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung technische und optische Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen.

2. Lieferumfang

Fußpflegeschränk AT/NT Mini
Handstückhalter (ohne Adapter)
Adapter Triton / Luna / Saturn
Adapter Neptun / Sirius / Puck
Gebrauchsanweisung

3. Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise befinden sich in den einzelnen Kapiteln. Sie sind mit einem ! gekennzeichnet und sollten, auch in Ihrem Interesse, unbedingt beachtet werden.

4. Systemzuordnung

Der Betrieb des Fußpflegeschranks AT/NT Mini ist für die Geräte

Fußpflegegerät **PUCK MICRO**
GERLACH Fußpflege-Spraygerät NEPTUN NT MICRO
GERLACH Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO
GERLACH Fußpflegegerät mit Absaugung TRITON AT MICRO
GERLACH Fußpflegegerät mit Absaugung LUNA AT MICRO
GERLACH Fußpflegegerät mit Absaugung SATURN AT MICRO

ausgelegt.

5. Inbetriebnahme

- Montieren Sie den Handstückhalter wahlweise auf der linken bzw. rechten Seite mit den beigefügten Schrauben an die Schrankseite
- Komplettieren Sie den Handstückhalter wahlweise mit dem Einsatz für das Spray- oder Absaughandstück durch einfaches einstecken von oben. Sichern Sie den Adapter mit der beiliegenden Schraube.

Nachfolgend werden die notwendigen Schritte bei Verwendung der Fußpflegegeräte **SATURN AT MICRO, LUNA AT MICRO, TRITON AT MICRO, SIRIUS NT MICRO, NEPTUN NT MICRO** und **PUCK** beschrieben.

Die optimale Position des Gerätes ist der obere Tablarauszug.

- Stellen Sie das Fußpflegegerät PUCK/NEPTUN/SIRIUS/TRITON/LUNA/SATURN auf den Auszug
- Stecken Sie den Netzstecker des Fußpflegegerätes in die 3-fach Steckdose

Bitte beachten Sie:

! Der maximale Anschlusswert der Mehrfachsteckdose beträgt 3600 W.

! Aus Sicherheitsgründen sollten Sie keine weitere Mehrfachsteckdose an die vorhandene Steckdose anschließen.

! Im Falle eines Defekts verwenden Sie bitte nur ORIGINAL ERSATZTEILE.

! Ein sicherer Betrieb mit Fußpflegegerät ist nur mit dem entsprechend geeigneten Zubehör möglich. So müssen Handstücke in einer sicheren Halterung fixiert werden, um z.B. ein Herunterfallen zu verhindern.

Beim Betrieb mit Anderen als den o.g. Geräten ist eine Haftung der Eduard Gerlach GmbH ausgeschlossen. Dieses gilt auch für Schäden die durch fehlendes oder nicht geeignetes Zubehör an den Geräten entstehen.

6. Allgemeine Sicherheitshinweise

Der Fußpflegeschränk darf nur auf horizontaler Ebene betrieben werden. Es besteht keine Kippsicherheit auf schrägen Ebenen (5° oder 10°). Bitte beachten Sie, dass beladene bzw. gefüllte Schubladen nicht gleichzeitig voll ausgezogen werden.

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des verwendeten Gerätes.

7. Hygiene

Im Bedarfsfall kann eine Desinfektion der Arbeitsplatte mit **Bacillol Plus** durchgeführt werden. Bei allen anderen Flächen ist die Reinigung mit einem feuchtem Tuch ausreichend.

Bitte beachten Sie:

! Für eine erfolgreiche Desinfektion ist gemäß den Herstellerhinweisen zur Dosierung und Einwirkzeit zu verfahren.

! Die Anwendung eines anderen Desinfektionsmittels kann zur Beschädigung der Oberfläche führen. In diesem Fall erlischt der Garantieanspruch!

! Vermeiden Sie ein Eindringen des Desinfektionsmittels in das Innere des Schrankes.

8. Wartung

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des verwendeten Gerätes.

9. Umwelt

Um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten, setzen Sie sich bitte mit der für Ihren Bezirk zuständigen Behörde in Verbindung.
Kontaminierte Geräte und Instrumente sind vor der Entsorgung zu desinfizieren.

10. Service

Um im Servicefall schnelle Hilfe leisten zu können, benötigen wir von Ihnen die Typenbezeichnung und Seriennummer des Schrankes. Die Angaben finden Sie auf dem Typenschild auf der Rückseite des Schrankes.

11. Ersatzteile/ Zubehör

Bestellnummer	Artikel
701875103	Mehrfachsteckdose mit E/A Schalter
701875006	Handstückhalter (ohne Adapter)
701875004	Adapter Triton / Luna / Saturn
701875005	Adapter Neptun / Sirius / Puck
701506503	Leuchtenhalter Universal

12. Garantie

Für den GERLACH Fußpflegeschränk AT/NT Mini gewährt die EDUARD GERLACH GMBH eine Garantie /Gewährleistung für die Dauer von 12 Monaten ab Rechnungsdatum. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile und/oder Teile, die durch den Gebrauch einer natürlichen Abnutzung unterliegen. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder fehlerhafte Bedienung entstehen, fallen ebenfalls nicht unter den Garantieanspruch.

13. Haftung

Die EDUARD GERLACH GMBH lehnt jegliche Haftung für Sach- und Personen-schäden ab, die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen können.